




Surveillez votre vision tous les jours

Moins d'une minute suffit!

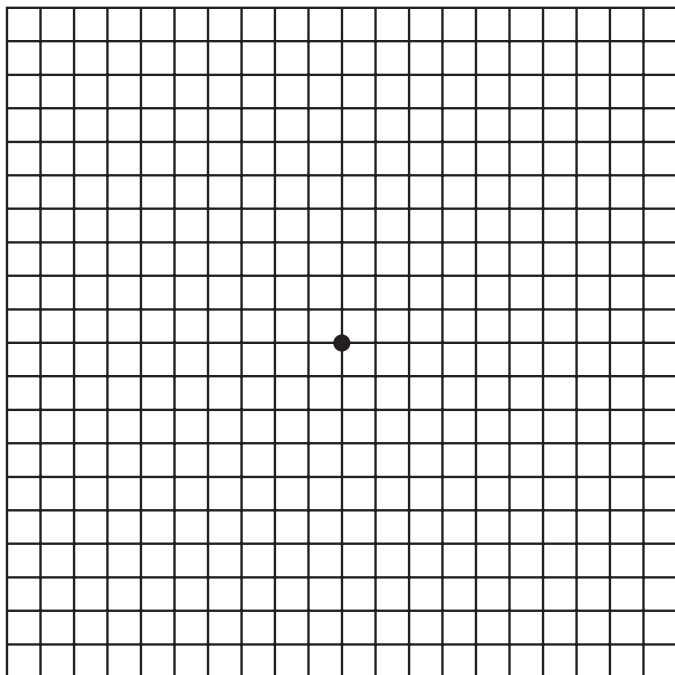

Mode d'emploi de la grille d'Amsler :

- Portez vos lunettes ou lentilles cornéennes
- Tenez la grille à une distance de lecture confortable
- Recouvrez un œil à la fois
- Fixez le point au centre; ne laissez pas votre œil s'éloigner de ce point

Contactez votre professionnel de la vue immédiatement si :

- Une ligne droite semble ondulée ou courbée
- La taille ou la forme d'une case est différente des autres
- Une zone a disparu, est floue ou décolorée

BAUSCH + LOMB
Mieux voir pour mieux vivre.

PreserVision^{MD}
Supplément de vitamines
et de minéraux pour les yeux